


■ ULRICH

PINZA TAGLIENTE
PER LAMINECTOMIA.
EASY CLEAN.

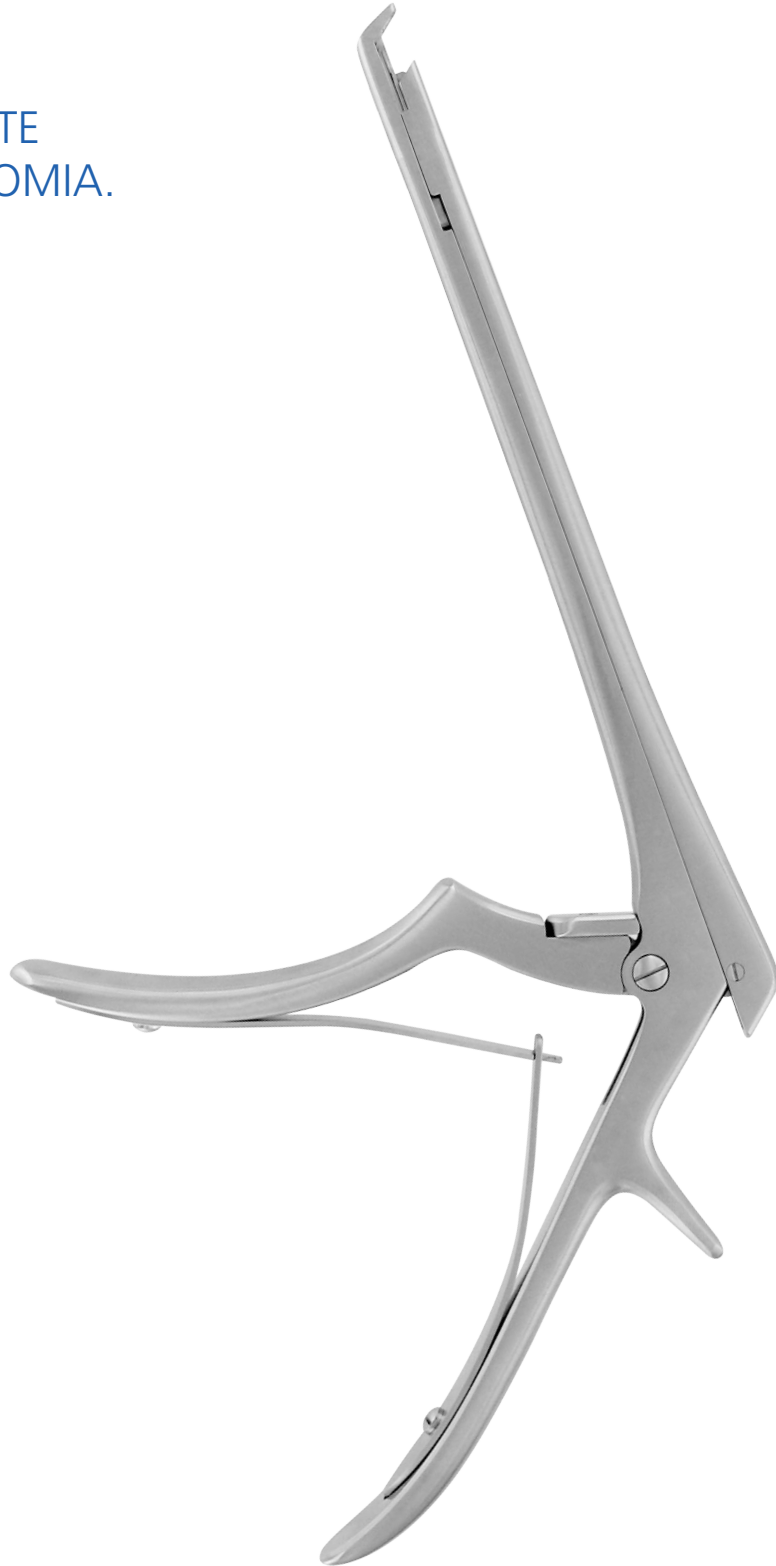

PINZA TAGLIENTE PER LAMINECTOMIA. EASY CLEAN.

UTILIZZO E VANTAGGI

In poche parole, si può dire che le pinze taglienti per laminectomia Easy Clean si contraddistinguono per quattro caratteristiche importanti.

LA PULIZIA

L'igiene è un aspetto fondamentale. Sollevando l'elemento scorrevole è possibile pulire la pinza in ogni punto. Come dice il nome stesso, questo strumento è anche facile da pulire.

LA SICUREZZA

Durante l'intero processo di rimessa a nuovo, asta ed elemento scorrevole rimangono sempre insieme. In questo modo, non è possibile scambiare le varie parti.


LA SEMPLICITÀ D'USO

Bastano poche mosse per smontare senza fatica l'asta. Come dice il nome stesso, questo strumento è anche facile da smontare.


IL VOSTRO SUCCESSO

Infine, la pinza Easy Clean vi aiuta a portare a termine con successo la vostra missione, ossia la cura ottimale del paziente.

**PINZA TAGLIANTE PER LAMINECTOMIA.
EASY CLEAN.**

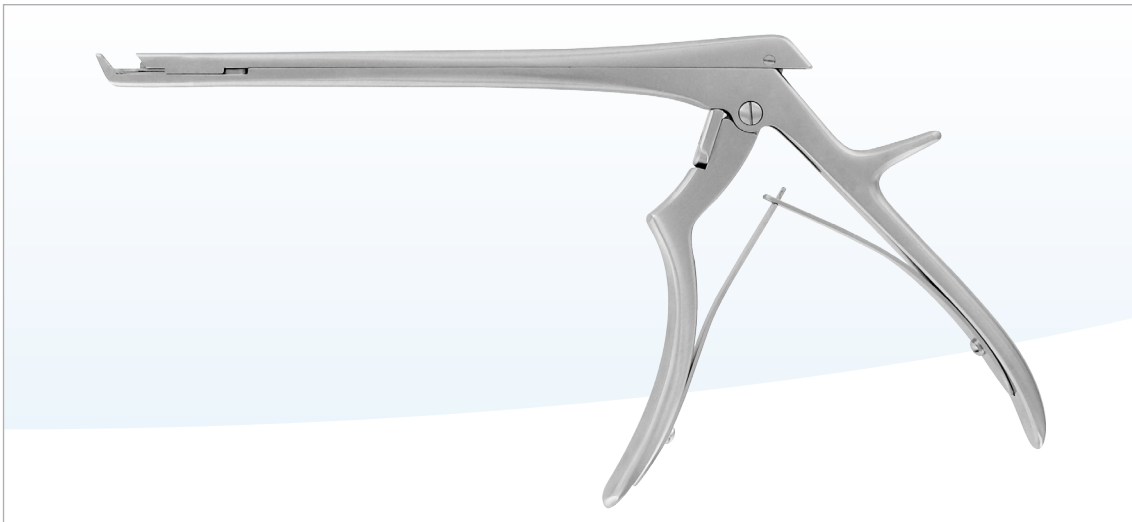


1 Pinza tagliente per laminectomia pronta all'uso.

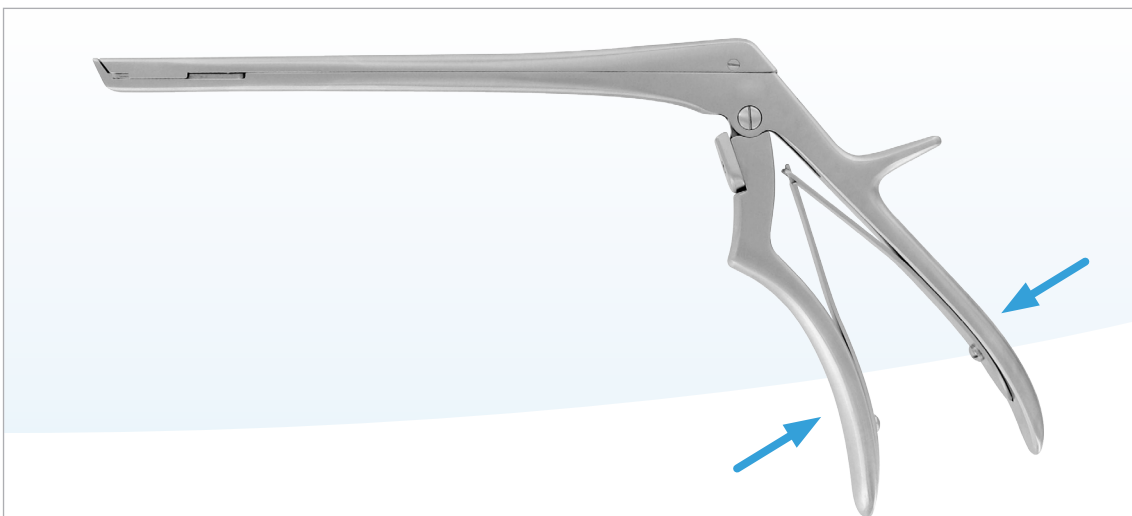


2 Serrare l'impugnatura.

**PINZA TAGLIENTE PER LAMINECTOMIA.
EASY CLEAN.**

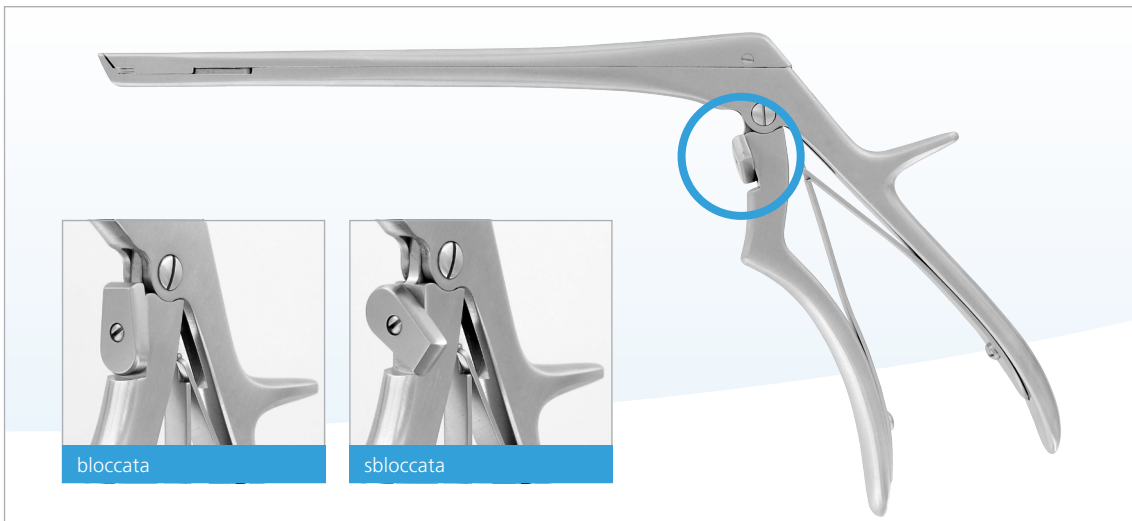


3 Girare la testina di sblocco.

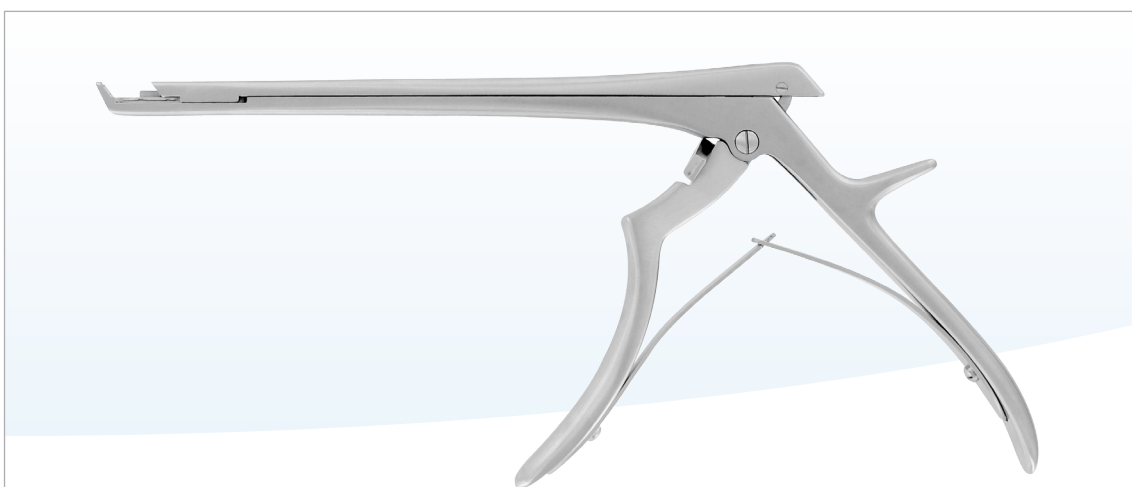

4 Aprire lentamente l'impugnatura.

**PINZA TAGLIENTE PER LAMINECTOMIA.
EASY CLEAN.**

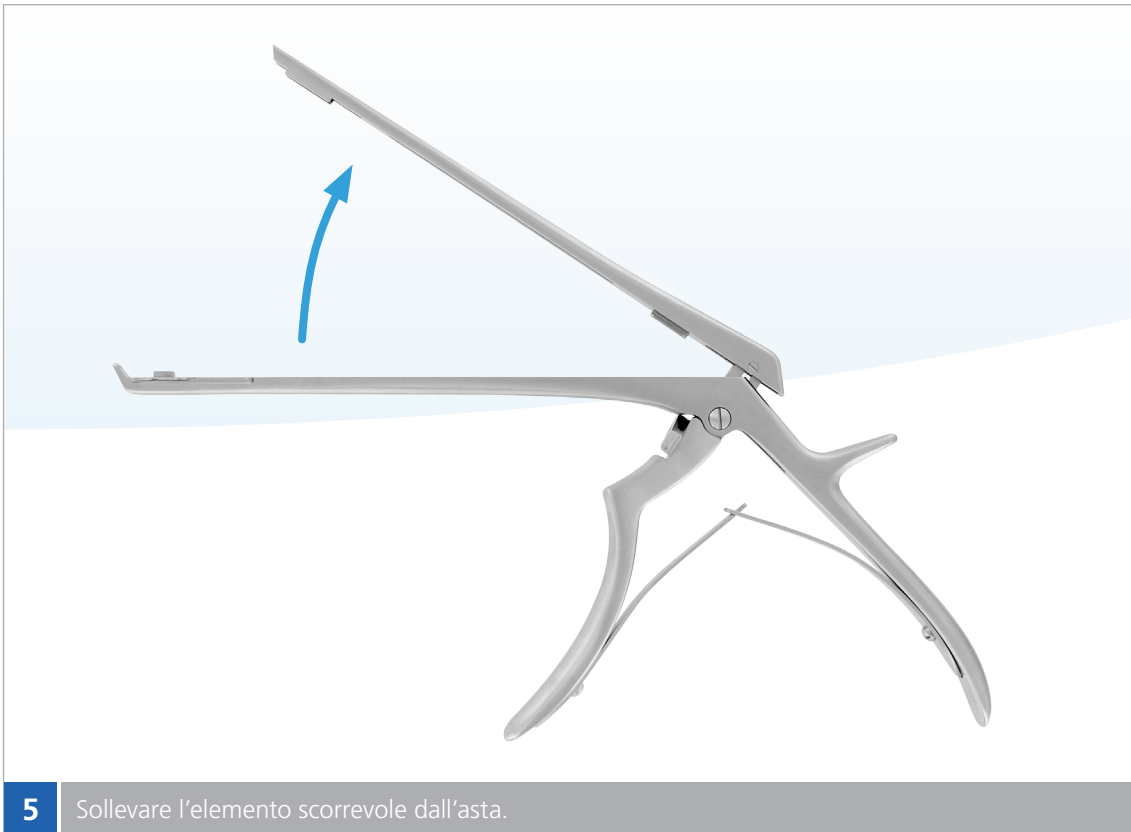

PINZA TAGLIENTE PER LAMINECTOMIA. EASY CLEAN.

STANDARD	18cm	20cm	23cm
1mm	U45-218-10	U45-220-10	U45-222-10
2mm	U45-218-20	U45-220-20	U45-222-20
3mm	U45-218-30	U45-220-30	U45-222-30
4mm	U45-218-40	U45-220-40	U45-222-40
5mm	U45-218-50	U45-220-50	U45-222-50
6mm	U45-218-60	U45-220-60	U45-222-60

PIATTA	18cm	20cm	23cm
1mm	U45-219-10	U45-221-10	U45-223-10
2mm	U45-219-20	U45-221-20	U45-223-20
3mm	U45-219-30	U45-221-30	U45-223-30
4mm	U45-219-40	U45-221-40	U45-223-40
5mm	U45-219-50	U45-221-50	U45-223-50
6mm	U45-219-60	U45-221-60	U45-223-60

Tutti i modelli sono disponibili presso Ulrich AG anche con il pregiato rivestimento AlTiN.



ULRICH AG.
SAN GALLO.

Mövenstrasse 12
Casella postale
CH-9015 San Gallo

Telefono +41 (0)71 314 62 62
Telefax +41 (0)71 314 62 99

www.ulrich-swiss.ch
info@ulrich-swiss.ch